

Uputstvo za čišćenje individualnih umetaka za slušne aparate

1. U OtoVita kutiju naspite 120 ml mlake vode.



2. U vodu ubacite jednu tabletu i sačekajte dok se ne istopi.



3. Skinite individualni umetak sa vašeg slušnog aparata i umetak ubacite u vodu u kojoj je predhodno rastvorena tableta. Umetak neka stoji u vodi narednih 30 minuta.



4. Izvadite umetak i properite pod mlazom vode.



5. Obrišite umetak, produvajte pumpicom i ostavite ga da se malo osuši.



6. Kada je umetak u potpunosti suv, vratite ga na slušni aparat.



Preporučuje se da vaše individualne umetke čistite na ovaj način barem jednom nedeljno, ukoliko vaš ušni kanal luči više ušne masti onda se ovaj postupak čišćenja preporučuje i češće (2-3 puta nedeljno).

Sušenje vašeg slušnog sistema

Pod slušnim sistemom se podrazumeva slušni aparat i individualni umetak. Oba ova dela možete isušivati od vlage, znoja i kondenzacije pomoću tableta za sušenje. Takođe možete na ovaj način isušivati i vaše kanalne (nevidljive) slušne aparate.

1. Stavite tabletu za sušenje slušnog sistema u OtoVita kutiju. U kutiji uvek mora da vam stoji tableta, kutija uvek mora da bude zatvorena, bez obzira da li je u njoj samo tableta ili su u njoj i tableta i slušni sistem. Ukoliko je kutija otvorena, tableta se mnogo brže troši. Tableta je istrošena kada njena boja pređe iz narandžaste u žutu. Kada se to dogodi, zamenite tabletu sa novom.



2. Skinite individualni umetak sa vašeg slušnog aparata.



3. Zatim stavite slušni aparat i umetak (tako razdvojene) u OtoVita kutiju u kojoj se već nalazi tableta za isušivanje. Obavezno izvadite bateriju iz vašeg slušnog aparata, baterija se ne sme stavljati u OtoVita kutiju.



4. Slušni sistem mora biti u kutiji minimum 7 sati, zbog toga se postupak sušenja slušnog sistema predlaže u toku noći. Kada izvadite slušni sistem iz kutije, on je isušen od vlage i znoja i možete vaš slušni aparat i umetak spojiti i postaviti na/u vaše uvo. Obavezno zatvoriti kutiju kad izvadite vaš slušni sistem iz nje. U kutiji treba da ostane samo tableta za sušenje.

Postupak isušivanja vašeg slušnog sistema možete raditi svako ili svako drugo veče. Zamenite tabletu kada primetite da ona požuti jer u tom trenutku ona više ne može da isušuje vaš slušni sistem.